

eCompression käyttöohje



ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Ohjausyksikkö on lukittuna kuljetuksen ajaksi. Lukituksen voi avata kytkemällä latausjohdon pistorasiaan ja liittämällä sen ohjausyksikköön. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näytölle ilmestyy tervetuloviesti.

Jos haluat lukita ohjausyksikön uudelleen, paina virtapainiketta 10 sekunnin ajan. Summeri antaa kaksi merkkiääntä, ja ohjausyksikkö lukittuu.

1. ASETA OHJAUSYKSIKKÖ:

- Aseta ohjausyksikkö tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Sijoita se niin, että näyttöön pääsee helposti käsiksi käytön aikana.

2. LIITÄ SAAPPAAT PÄÄLETKUN LIITTIMEEN:

- Napsauta kunkin saappaan letkuliitin pääletkuliittimeen. Paina tiukasti, mutta varoen liiallista voimaa. Huomio liittimien tekstit, että ne on jokaisessa samoin päin.

3. LIITÄ PÄÄLETKUN LIITIN OHJAUSYKSIKKÖÖN:

- Napsauta pääletkun liitin ohjausyksikköön. Paina lujasti paikalleen, mutta varoen liiallista voimaa.

4. KÄYTTÖVALMISTEET:

- Älä käytä saappaita paljaalla iholla.
- Pue alle kevyet ja joustavat vaatteet (esim. verkkarit tai leggingsit) hygienian varmistamiseksi ja ihon ärsytyksen välttämiseksi.
- Vaatteissa ei saa olla vetoketjuja, nappeja tai muita kovia osia, jotka voivat vahingoittaa saappaita.
- Poista kaikki korut, kellot ja muut esineet, jotka jäisivät saappaiden alle.

5. MITEN SAAPPAAT LAITETAAN JALKAAN JA RIISUTAAN:

- Istu mukavaan asentoon jalat suorina ja polvet hieman koukussa.
- Aseta jalkasi saappaisiin. Vedä saappaat vartaloasi kohti ja venytä ne mahdollisimman pitkiksi.
- Sulje vetoketjut. Varmista, että jalkasi ovat kokonaan saappaissa ennen täyttöö. Jos saappaat tuntuvat liian tiukoilta, tarvitset suuremman koon.
- Älä täytä saappaita vetoketjut auki – se voi vahingoittaa saappaita.
- Älä täytä saappaita, elleivät molemmat ole jalassa tarkoitetulla kehon alueella – muuten saappaat voivat vahingoittaa.
- Älä seiso tai kävele saappaat jalassa.
- Anna saappaiden tyhjentyä kokonaan ennen niiden riisumista. Älä poista saappaita, kun ne ovat vielä täyttyneet.
- Saappaat pitäisi voida riisua liu'uttamalla jalka ulos tai vetää takaisin jalkaan ilman, että vetoketjuja tarvitsee avata jokaisella käyttökerralla.
- Purista loputkin ilmat pois saappaista käsin painamalla niitä varovasti.

6. MITEN OHJAUSYKSIKKÖ KYTKETÄÄN PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ:

- Varmista, että ohjausyksikön lukitus on avattu (katso kohta Ennen käyttöä).
- Kytke laite päälle pitämällä on/off-painiketta painettuna, kunnes kuulet merkkiään ja näyttö syttyy.
- Sammuta laite pitämällä on/off-painiketta painettuna, kunnes kuulet merkkiään ja näyttö sammuu.

7. VALITSE TILA (5 tilaa, 8 lokeroa):

- Pneumaattiset puristusmuodot (PAINE mmHg): tila ilmaisee, missä järjestyksessä ilmakammiot täyttyvät – katso lisätietoja taulukosta.
- Vaihda toimintatilojen (A–E) välillä painamalla toimintatilapainiketta ja valitse haluamasi ohjelma.
- Valaistu pylväs ilmaisee sen kammion, joka täyttyy istunnon aikana. Täysin täyttynyt kammio pysyy korostettuna. Yhden kammion täytyminen kestää noin 25 sekuntia.

8. VALITSE PAINE JA AIKA:

- Sääda paine painamalla painepainiketta, kunnes saavut halutun arvon.

- Aseta aika painamalla aikapainiketta.
- HUOM: Suosittelemme, ettet käytä saappaita ensimmäisellä käyttökerralla yli 20 minuuttia tai yli 100 mmHg paineella

9. ISTUNNON KÄYNNISTÄMINEN/TAUOTTAMINEN:

- Aloita istunto painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta.
- Jos haluat keskeyttää istunnon, paina painiketta uudelleen. Turvallisuuksista saappaat tyhjäntyvät hieman ja täyttyvät uudelleen, kun jatkat käyttöä.
- Jos tauko kestää yli minuutin eikä istuntoa jatketa, kuuluu äänimerkki ja ohjausyksikkö sammuu automaattisesti.

10. ISTUNNON LOPPUUN SAATTAMINEN:

- Istunnon päätyttyä ohjausyksikkö sammuu ja saappaat alkavat tyhjäntyä.
- Anna saappaiden tyhjäntyä kokonaan ennen kuin avaat vetoketjut

PAKKAUSTILAT

TILA A: Kun ensimmäinen kammiotäyttö valittuun paineeseen, toinen kammiotäyttö alkaa täyttyä ja ensimmäinen kammiotäyttö tyhjenee. Kun toinen kammiotäyttö täysin, kolmas kammiotäyttö alkaa täyttyä ja toinen kammiotäyttö tyhjenee jne.



TILA B: Kun yksi kammiotäyttö valittuun paineeseen, seuraava kammiotäyttö alkaa täyttyä ja edellinen tyhjenee. Sykli etenee kammiotäyttö kerrallaan.



TILA C: Kaksi kammiotäyttöä täyttyy yhtä aikaa ja tyhjenee, kun seuraavat kaksi kammiotäyttöä täyttyvät. Sitten sykli toistuu.



MODE D: Kaksi kammiotäyttöä täyttyy kerrallaan, kunnes kaikki kammiotäytöt ovat täynnä. Sen jälkeen kaikki kammiotäytöt tyhjenevät yhdessä ja sykli alkaa uudelleen.



TILA E: Yksi kammiotäyttö täyttyy kerrallaan ja tyhjenee, kun seuraava täyttyy. Sykli muistuttaa tilaa A, mutta kammiotäytöt eri järjestyksessä.



HUOM: Kuvat edustavat vakioversiota, jossa on 4 kammiotäyttöä. Pro-versiossa logiikka on sama, mutta käytössä on 8 kammiotäyttöä.