

LedPro käyttöohje

Jos LedPro on sammutettu, niin LedPro käynnistyy näytön viereisestä **hopeisesta painikkeesta**

Kun näyttöön tulee CTN logo, **täppää näyttöä sormella**



Säädä haluttu hoitoaika. Kellon vasemmanpuoleisista painikkeista muuttuu minuutit ja oikeanpuoleisista muuttuu sekunnit. Suositeltu hoitoaika on **12 minuuttia**.

Vasemmassa alanurkassa on tuulettimen säätö.

Seuraavaksi paina Start -painiketta. Laite käynnistyy



Avaa kansi, mene selälleen laitteeseen ja vedä kansi kiinni.

Kun aika lähenee loppua, 10 sekuntia ennen ajan päättymistä kuulumaan piippaus ääntä ja ajan loputtua valot sammuvat.

Avaa luukku ja poistu laitteesta.

Huomioita

Hoito suositellaan suoritettavan mahdollisimman vähissä vaatteissa, vähintään alushousut päällä. Poista korut ja kello.

Hoidon aikana suositellaan käytettävän suojalaseja, jotka ovat lipaston päällä. Voi suorittaa hoidon ilman suojalaseja, mutta silmät on pidettävä kiinni.

Lopuksi puhdista alusta lipaston päällä olevalla puhdistusaineella, 4–5 sumutusta, ja pyyhi pinta. Pyyhkäise myös silmäsuojia. Sammuta tuuletin. Laite hurisee jonkin aikaa itsestään.

Hoitoaika on 10–20 minuuttia. Yli 20 minuutin hoitoajasta ei saa lisä hyötyä.

Ensimmäisellä kerralla aseta tuulettimen nopeudeksi 3, seuraavilla kerroilla voit halutessasi asettaa hiljaisemman nopeuden. Tuuletinta on hyvä käyttää, koska valot lämmittävät hivenen laitetta.