


OxyPro käyttöohje


- 1- Ota valkoisen kaapin oikeasta ylähyllystä happiviikset, eivät ole pakolliset
- 2- Käynnistä AIO -laite takapanelissa olevasta virtakytkimestä

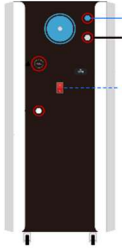

- 3- Valitse Timer:stä haluttu hoitoaika
- 4- Paina kaikki viisi painiketta pohjaan alkaen vasemmalta




- 5- Siirry matkustamoon ja sulje ensin ulompi vetoketju kunnolla ja sen jälkeen sisempi

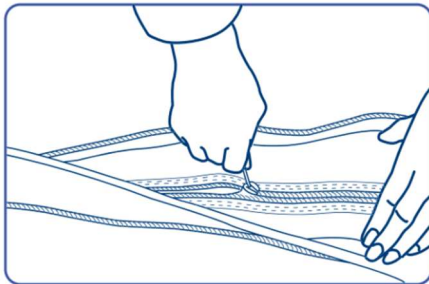

- 6- Varmista, että sisäinen paineventtiili on Close asennossa (vastapäivää käännetty)



- 7- Kytke happiviikset matkustamon takaseinän oikeassa reunassa olevaan harmaaseen liittimeen, älä käytä liiallista voimaa.
- 8- Matkustamon paineineistus kestää noin 10min. Paineistuksen aikana tulee sama ilmiö kuin lentokoneen noustessa, korvat voivat mennä lukkoon.
- 9- Matkustamo on paineistettu, kun painemittasi osoittaa 50kPa

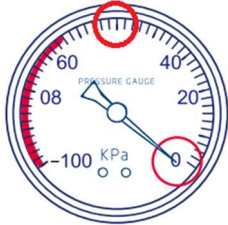


Sisäinen paine
mittari


- 10- Laita varmuuden vuoksi itsellesi herätys, jos rentoudut riittävästi ja nukahdat
- 11- Kun hoitoaika tulee täyteen, ulkoinen AIO-laite vinkuu merkiksi
- 12- Käännä paineventtiiliä Open suuntaan rauhallisesti (myötäpäivää). Paine poistuu sitä nopeammin, mitä enemmän avaat paineventtiiliä. Paineen laskiessa korvat voivat poksua, samalla tavalla kuin lentokoneen laskeutuessa



- 13- Irrota happiviikset liittimestä ja ota ne mukaasi
- 14- Kun painemittari osoittaa 0 kPa ja suhina on loppunut, avaa ensin sisäinen vetoketju ja sen jälkeen ulkoinen vetoketju

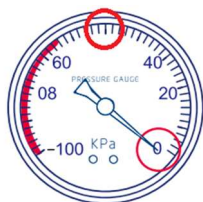

Sisäinen paine
mittari

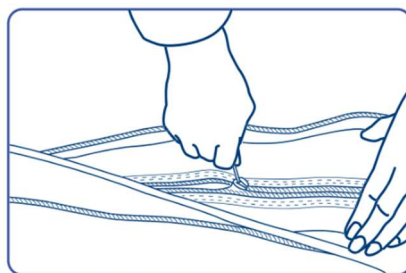

- 15- Ennen kuin poistut matkustamosta, käännä paineventtiili Close asentoon (vastapäivää)




16- Paina painikkeet sammuksiin yksi kerrallaan oikealta alkaen

17- Jätä Timer OFF asentoon



18- Lopuksi sammuta AIO-laita takapanelin virta painikkeesta

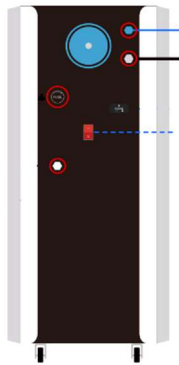

19- Säilytä happiviikset seuraava käyttöä varten. Jokaiselle on yhdet happiviikset