

X-CRYO käyttöohje

1- Esijäähdytys




Kytke laite päälle virtakytkimestä, laitteen takana

Esijäähdytysprosessi käynnistyy automaattisesti ja kestää noin 3–5 minuuttia

Esijäähdytysprosessin edistyminen näkyy näytöllä

Kun esijäähdytys on päättynyt, kohdassa 2. mainittu käyttöliittymän näyttö tulee automaattisesti näkyviin ja laite on käyttövalmis

2- Valmis käyttöön

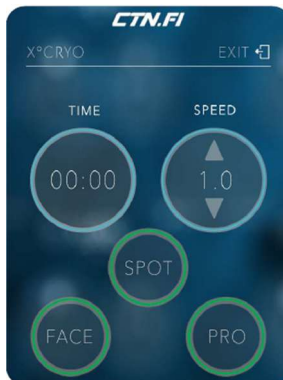


Valitsen näytöltä FACE-, SPOT- tai PRO-hoito-ohjelma laitteen käytön aloittamiseksi

SPOT – kesto 1min, FACE – kesto 2min tai PRO – kesto 3min

Puhallusnopeus säädetään kohdasta SPEED

1 – 12 m/s, 2 – 15 m/s ja 3 – 18 m/s

3- Käytön aikainen

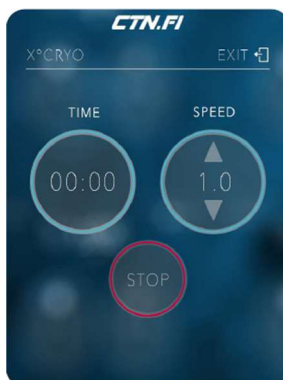


Kun käyttö on alkanut, jäljellä oleva aika näkyy näytöllä. Käyttö voidaan keskeyttää milloin tahansa napauttamalla STOP-painiketta

Puhallusnopeutta pystyy säätämään myös käytönaikana

4- Käytön lopettaminen

Sammuta laite virtakytkimestä ja palauta laite säilytyspaikkaan

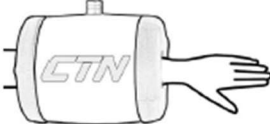

	POLVI (PRO) Hoitopää: Kuppi Ilmavirta: 2 Aika: 2.0 - 3.0 min		KASVOT (FACE) Hoitopää: Maski Ilmavirta: 2 Aika: 2.0 - 3.0 min
	KYYNÄRPÄÄ (PRO) Hoitopää: Kuppi Ilmavirta: 2 Aika: 2.0 - 3.0 min		RANNEKE (PRO) Hoitopää: Kuppi Ilmavirta: 2 Aika: 2.0 - 3.0 min
	OLKAPÄÄ (PRO) Hoitopää: Kuppi Ilmavirta: 3 Aika: 2.0 - 3.0 min		PIENI ALUE (SPOT) Hoitopää: Putki Ilmavirta: 2 Aika: 1.0 min
	SELKÄ, LONKKA (PRO) Hoitopää: Kuppi Ilmavirta: 3 Aika: 2.0 - 3.0 min		LEUKA (PRO) Hoitopää: Kuppi Ilmavirta: 2 Aika: 2.0 - 3.0 min
	NISKA (PRO) Hoitopää: Kuppi Ilmavirta: 2 Aika: 2.0 - 3.0 min		LIHAKSET (PRO) Hoitopää: Pallo Ilmavirta: 3 Aika: 2.0 - 3.0 min
	NILKKA (PRO) Hoitopää: Kuppi Ilmavirta: 2 Aika: 2.0 - 3.0 min		AKILLES (PRO) Hoitopää: Jalka Ilmavirta: 2 Aika: 2.0 - 3.0 min

Huom. Ilmavirran nopeus on säädettävä asiakkaan kylmänsietokyvyn mukaan.
Infrapunalämpömittarin käyttöä suositellaan optimaalisten tulosten ja valvonnan varmistamiseksi.